

安全に使うために

- 自動車・バイク・自転車の運転中は使用しないでください。
- 本製品は防水ではありません。水や雨にさらさないでください。
- コントローラーは本製品専用です。他の電気製品への電源供給(充電)はできません。リチウムイオン電池を内蔵しているため、航空機では預け入れ手荷物とせず、必ず手荷物として客室内へお持ち込みください。
- 歩行中の倍率変更はしないでください。
- 外出時は白杖の併用を推奨します。
- 慣れるまでは自宅室内で装用してください。
- 精密機器のため丁寧にお取り扱いください。

故障・不具合、使い方に関する
よくあるご質問については
以下のwebページをご覧ください




暗所視支援眼鏡

MonWalker

スタートアップガイド

vixion _

同梱物

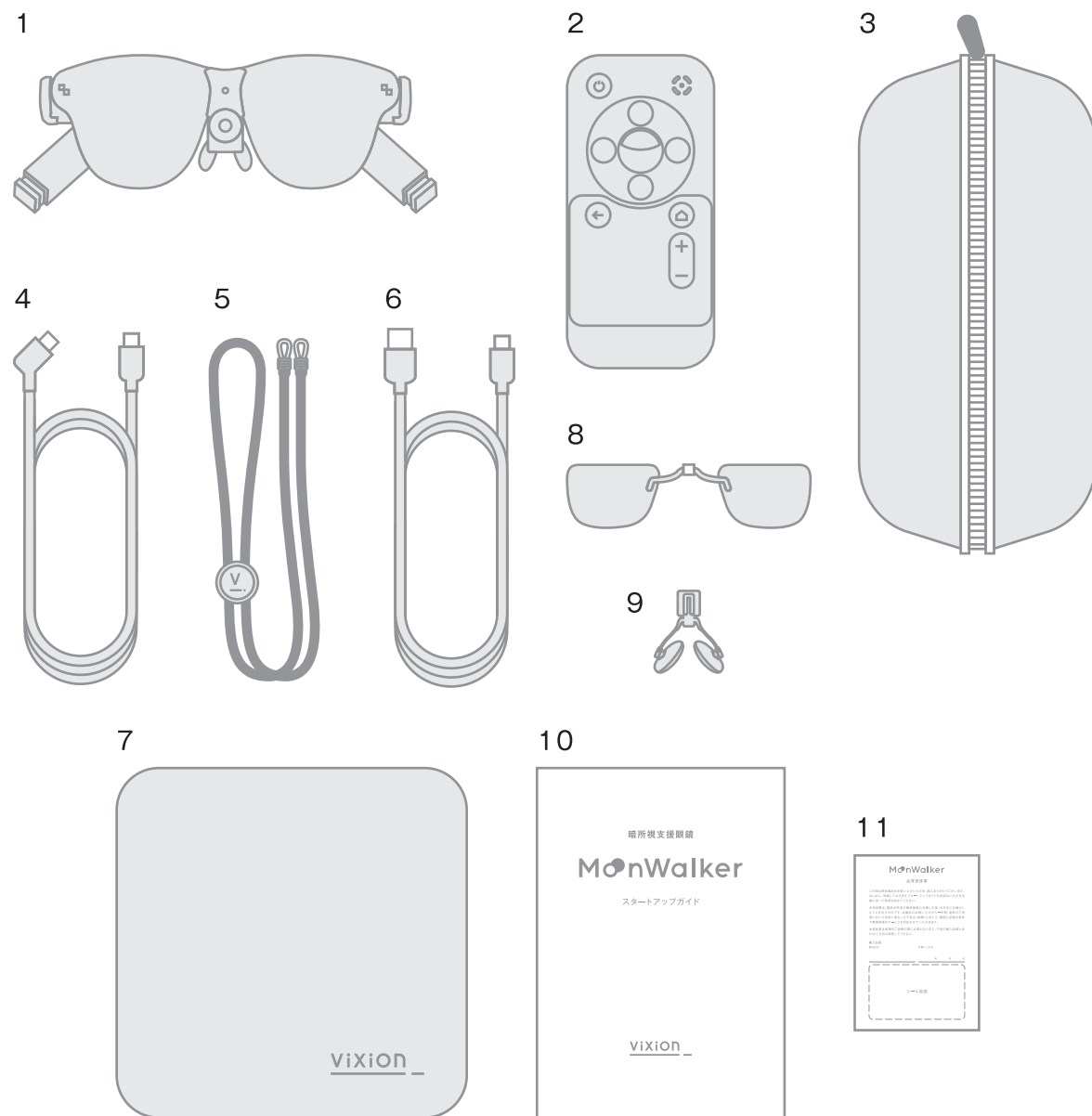

1. MoonWalker本体

2. コントローラー

3. 専用ケース

4. 本体接続用ケーブル (USB Type-C)

5. メガネバンド

6. コントローラー充電用ケーブル (USB Type-A to Type-C)

7. レンズクロス

8. インナーフレーム

9. 交換用鼻パッド

10. スタートアップガイド


11. 製品保証書

接続準備

付属の本体接続用ケーブルを使い、
本体とコントローラーを接続します。


① 付属ケーブルを準備

本体とコントローラーをつなぐケーブルは、必ず付属の本体接続用ケーブルを使用します。

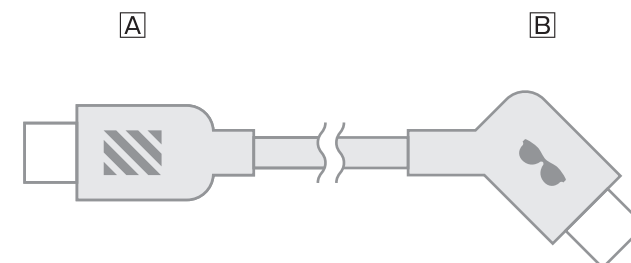


② 本体へ接続

本体右側ツル端の接続口に、ケーブル端子Bを奥まで差し込みます。

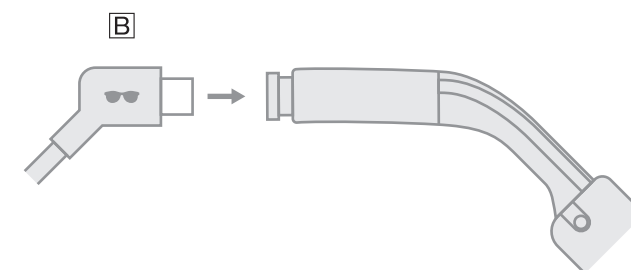

③ コントローラーへ接続

ケーブル端子Aをコントローラー底面右側の「HEADSET」端子へ接続します。

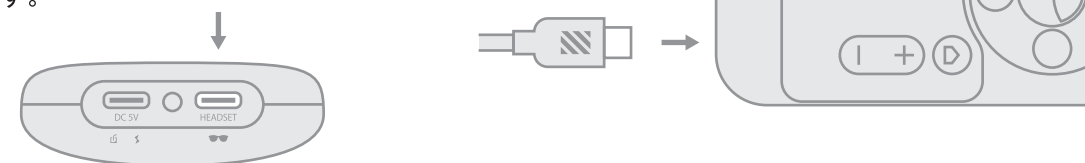


接続時の注意：DC 5V端子（底面左側）は充電用です。本体との接続には使いません。端子は無理に押し込まず、まっすぐ差し込みます。ケーブルや端子に強い力をかけないでください。

電源ON・カメラ許可

電源ボタンを押して電源を入れ、しばらくするとカメラ接続許可画面が表示されます。

はじめにカメラキャップを外します。その後、確認画面でOKを選択するとカメラ映像が起動します。

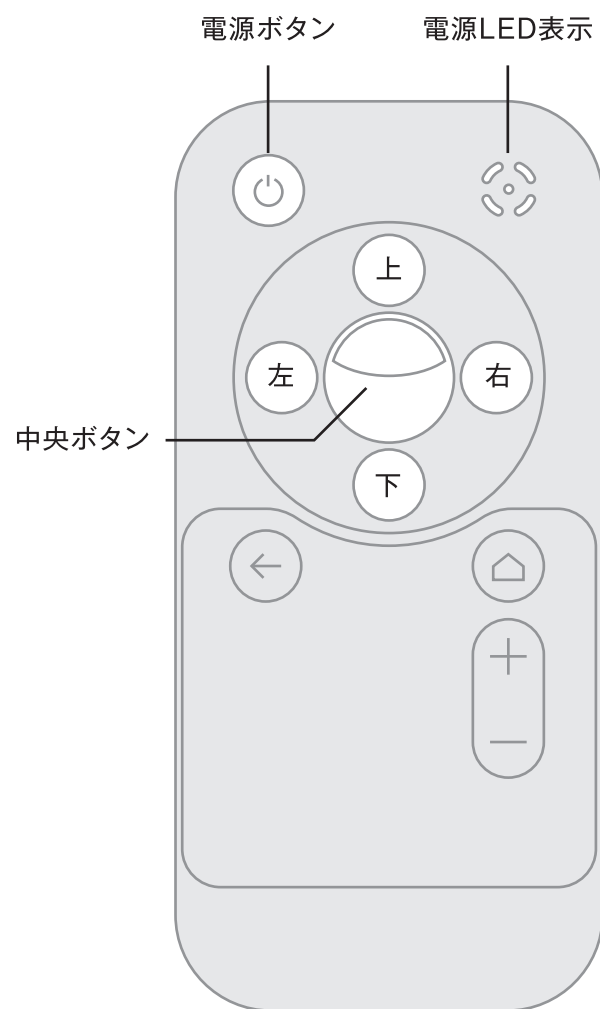

①電源を入れる

電源ボタンを約2秒長押しすると、電源LEDが点灯します。

②確認画面でOK

「カメラが接続されていません」画面で上ボタンでOKへ移動し、中央ボタンで決定します。



③暗所視支援モードへ

映像が表示されれば起動完了です。画面拡大キーが数秒表示されます。

④明るさの調整

初期設定では明るさを暗めに抑えています。見やすい明るさに調整してください。調整の仕方は基本操作のページをご確認ください。

ワンポイント


反応しない時は、ケーブルとコントローラーのHEADSET端子が正しく接続されているかを確認して再起動してください。映像が出ない場合はカメラキャップを取り外しているか確認してください。

装着・見え方調整①

装着後、鼻パッドとツル角度を調整して見やすい位置に合わせます。


①メガネバンドを取り付け、本体を装着

- ・メガネバンドをツル両端のくぼみに取り付けます。
- ・バンドがねじれていないか確認します。
- ・本体がずり落ちないように、安定した状態で装着します。
- ・最初は座った状態で映像に慣れてください。

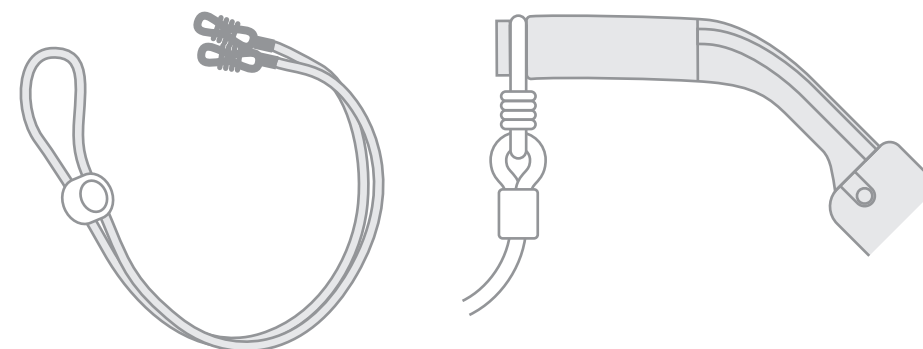


②鼻パッドを調整

- ・つまんで引き出すと近・中・遠の3段階で調整できます。
- ・パッドアームの開き具合を顔になじむ位置で調整します。
- ・スクリーン位置が高い／低い、左右が合わない場合は少しずつ調整します。

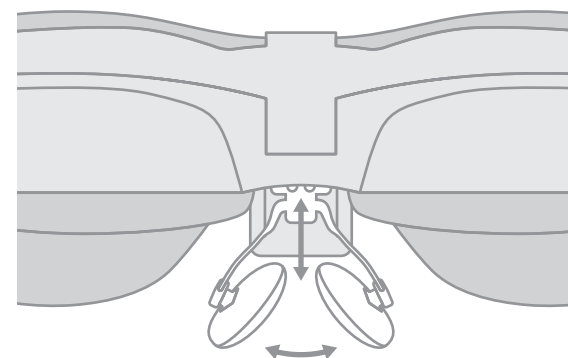

装着・見え方調整②

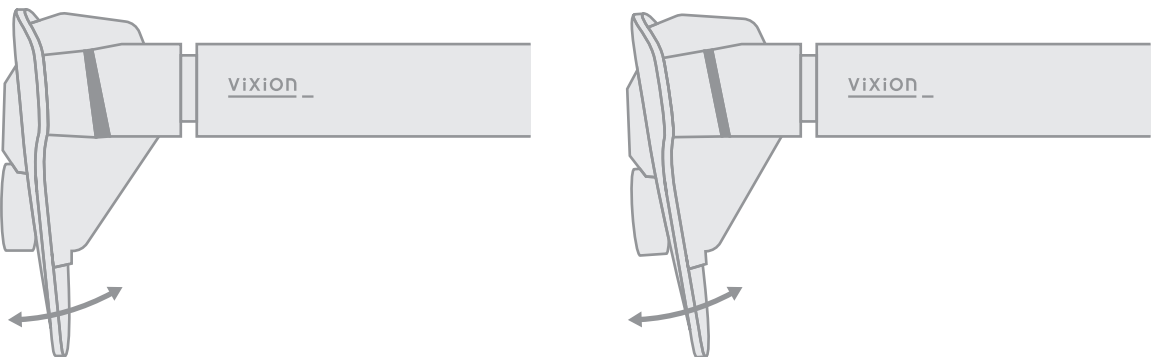

③ツル角度と画面位置を合わせる


- ・左右のツル付け根を上／中／下の3段階で調整できます。
- ・少し力を入れてカクカクと曲げ、スクリーンの上下位置を合わせます。
- ・「一番見やすい位置」を探してから使用を開始してください。

※歩きながら調整せず、安全な場所で行ってください。

④インナーフレームの取り付け

視力の矯正が必要な場合には矯正レンズを取り付けたインナーフレームを取り付けることが可能です。本体をご購入いただいた店舗にご相談ください。

- ・本体から鼻パッドを抜き出します。
- ・組付けアームのカバーを外します。
- ・インナーフレームの中央部のU字溝を鼻パッドの組付けアームにはめて固定した後、鼻パッドを本体に差し込みます。

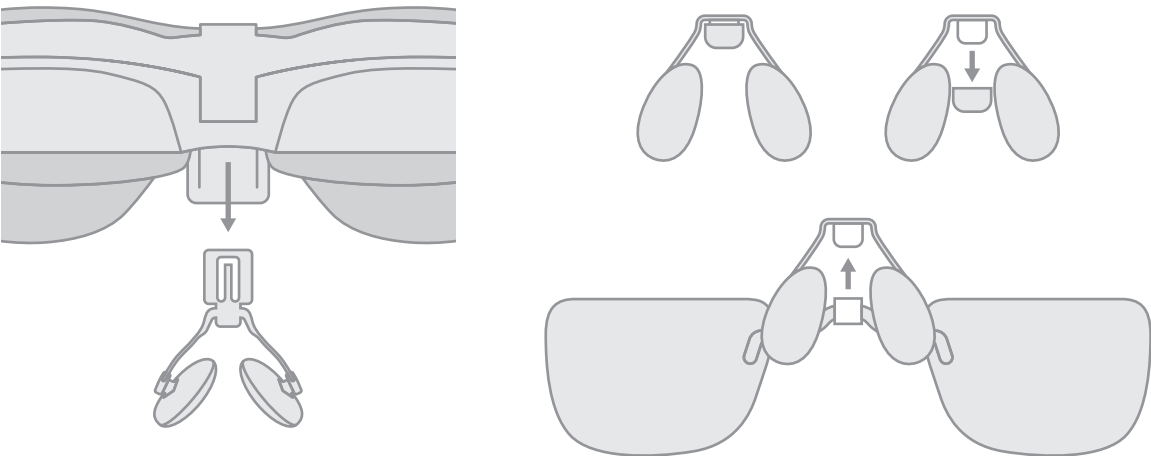

基本操作・終了・注意

倍率、色調変更、明るさ調整、電源OFFの基本操作です。

倍率調整

上ボタン…拡大
下ボタン…縮小

色調変更

中央ボタン長押しで切り替え
[標準→白黒→白黒反転]

明るさ調整

本体右ツル下部にあるボタンで調整
[前側…明るく／後側…暗く]

※出荷時は明るさを下げて設定してあります。

電源OFF

電源LEDが消えるまで
電源ボタンを長押し




充電

コントローラー下部左側の「DC5V」端子に
充電用ケーブルを接続します。

充電残量

電源LED表示でおおよその電池残量を
確認することができます。

※40%以下になると画面右端に赤い電池バーが表示されます。

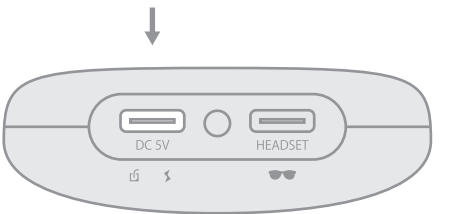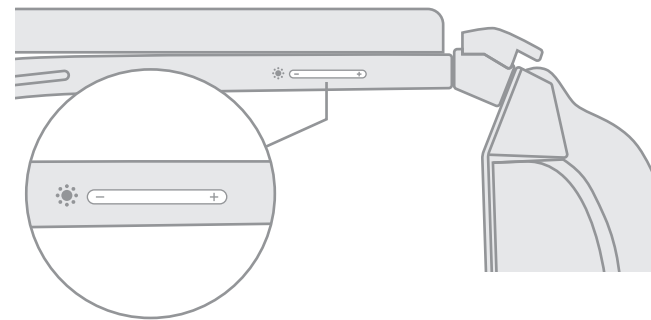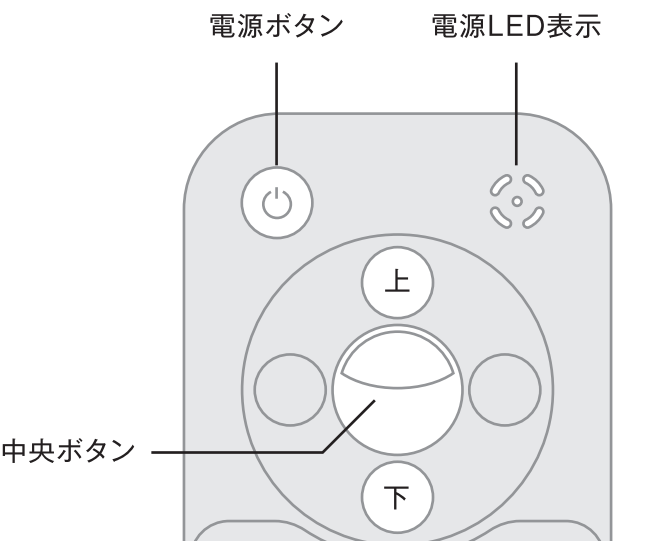

100%	75%	50%	25%	0%